



Suprasorb[®] CNP P3





Кейс для переноски и хранения аппарата

Прикроватный крепеж



Аппарат



Контейнер
250 ml

Инструкция по применению



Контейнер
1000 ml



Сумка для пациента






Зарядное устройство

A Многоразовый контейнер для сбора экссудата 250ml и одноразовым коллектором внутри (возможно использование контейнера с коллектором на 1000 ml)

B Соединительная трубка

C Дисплей

D Панель управления

-  включение аппарата
-  выключение звука сигнала об ошибке
-  индикация подключения к зарядному устройству



E Порт подключения к зарядному устройству

F LED индикационная полоса (загорается оранжевым цветом при появлении сообщения об ошибке)




Настройки режима терапии



- Выбор постоянного или переменного режима
- Настройка уровня давления 
- Установка времени 
- Установка чувствительности системы




Красный
= ошибка

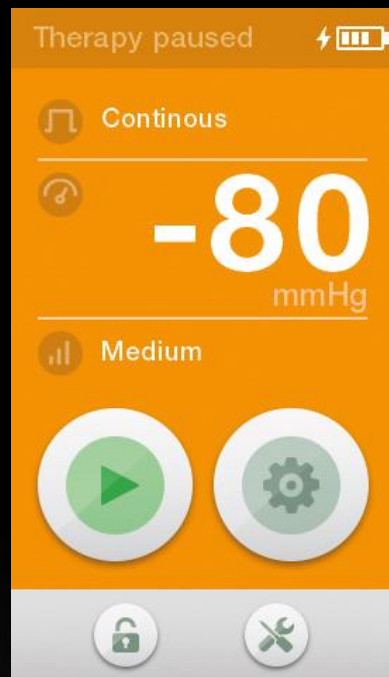

Оранжевый
= пауза



Зеленый
= режим работы

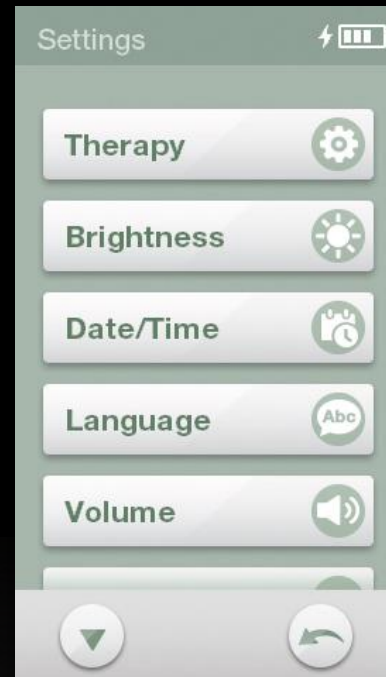


Серый
= настройки




Многоразовый контейнер для экссудата


- Надежно крепится к аппарату
- Позволяет замерять количество отделяемого в процессе терапии

Одноразовый коллектор для сбора экссудата

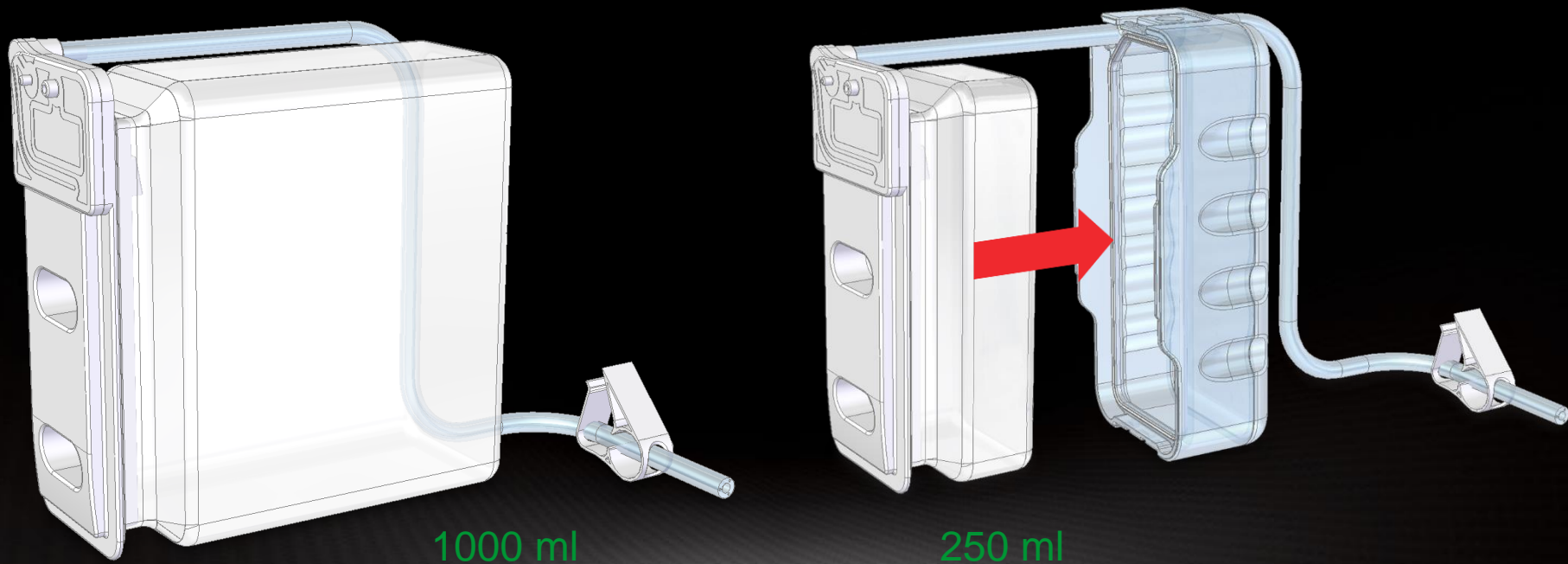

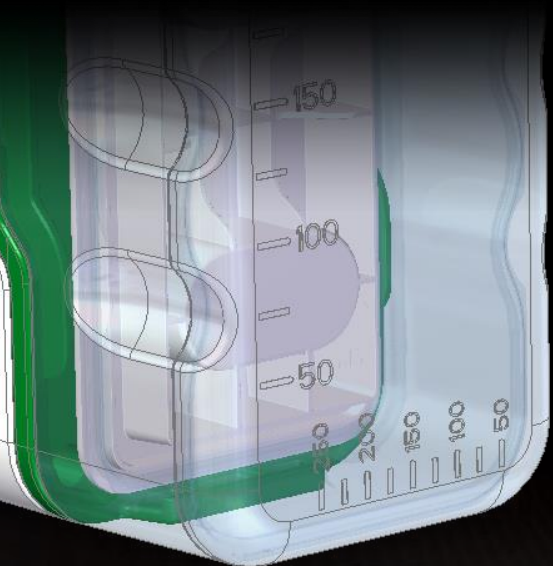

Соединительная трубка надежно
соединяется с дренажом

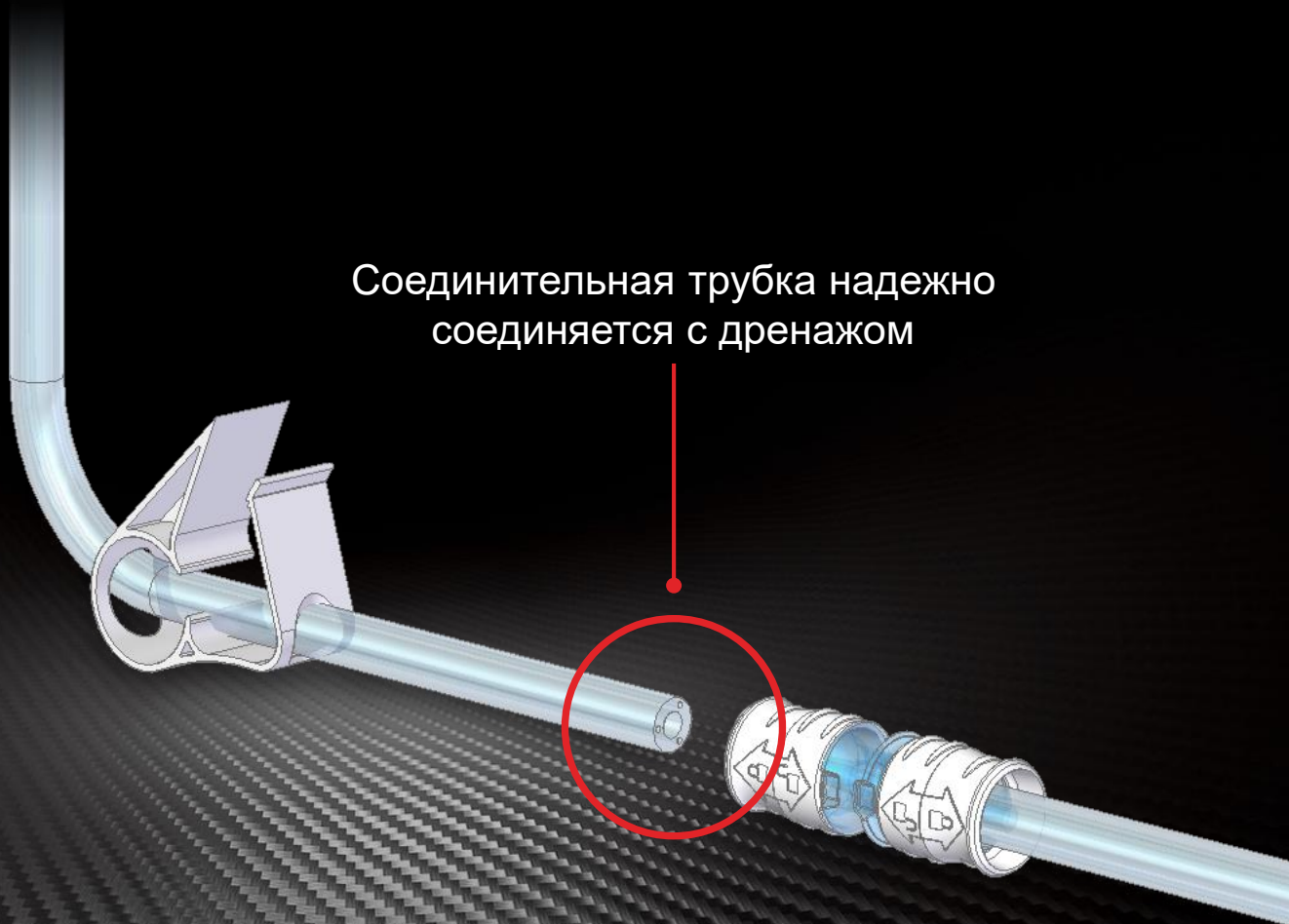

Дренажи


Глубокий дренаж для лечения обширных и глубоких ран, может использоваться при лечении эмпиемы плевры, несостоятельности анастомозов пищевода и перитонита



Дренажный блок подходит для лечения поверхностных ран различной этиологии



Вентиляционные просветы

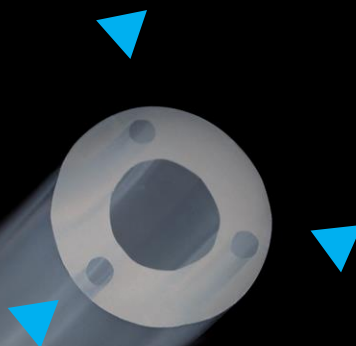


Позволяют следить за уровнем давления непосредственно в ране, делая терапию еще более эффективной

CNP Kits

Открыто пористая губчатая повязка

Стимулирует клеточную активность и формирование слоя грануляции в ране

Открытая пористая структура (400-600 микрон) помогает обеспечивать равномерное распределение отрицательного давления в ране

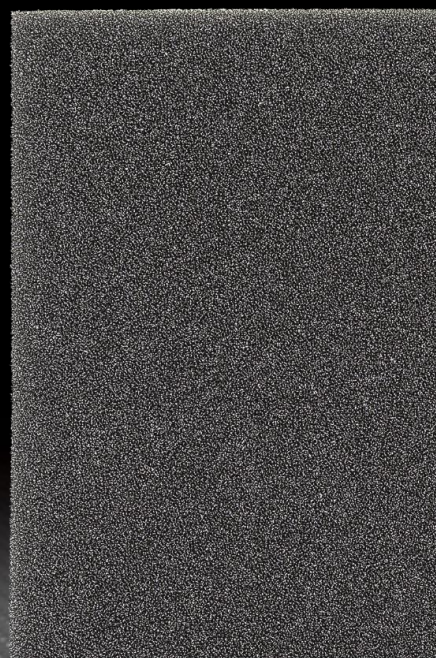

Сумка для ношения аппарата
позволяет пациенту сохранять
мобильность

- Ремень сумки может регулироваться по длине
- Зарядка аппарата и настройка может производиться не вытаскивая аппарат из сумки
- Сумка изготовлена из высококачественных материалов, которые обеспечат долгое использование

